

Rhino Clear®

**Doccia nasale per
le alte vie respiratorie**

Nasal wash for the
upper airways



**Adattatore nasale
fino a 3 anni**
Nasal adapter up
to 3 years



**Adattatore nasale
da 3 a 12 anni**
Nasal adapter
from 3 to 12 years



**Adattatore nasale
dai 12 anni in su**
Nasal adapter
from 12 years old



— 50 —
anni di eccellenza italiana
years of italian excellence

Rhino Clear®

Doccia nasale per le alte vie respiratorie
Nasal wash for the upper airways



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Rhino Clear® nebulizza 10 ml di soluzione in circa 2 minuti / Rhino Clear® Nebulizes 10 ml of solution in about 2 minutes

È dotata di una camera di nebulizzazione da riempire con max 10 ml di soluzione / Equipped with a nebulization chamber fillable with max 10 ml of solution

Nebulizza la soluzione e rimuove le secrezioni, le polveri e le sostanze nocive presenti sulle mucose epiteliali all'interno dei seni paranasali raccogliendole in un apposita camera / It nebulizes solution and removes secretions, dust and harmful substances that have accumulated inside the paranasal sinuses and collects them in a special chamber

Il corpo doccia ergonomico costituisce una comoda impugnatura fornita di pulsante per attivare la nebulizzazione senza fatica / The ergonomic nasal wash body allows a comfortable handle provided with a practical button to control the nebulization

Rhino Clear® è abbinabile a tutta la gamma di compressori pneumatici Flaem e a qualsiasi altro compressore per aerosol terapia disponibile in commercio / Rhino Clear® is compatible with the entire range of Flaem compressor nebulizer systems and any other commercially available compressor nebulizing system

È utilizzabile con soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, ai liposomi, etc.), acque termali e con farmaci, questi ultimi prescritti dal medico / It can be used with saline solutions (isotonic, hypertonic, liposome solutions, etc.), thermal waters or medications commonly available in pharmacies

I componenti di Rhino Clear® sono realizzati con materiali atossici
Rhino Clear® components are made of biocompatible, non-allergenic materials

Rhino Clear® è dotato di tre adattatori nasali per adattarsi meglio alle narici
Each Rhino Clear® comes with 3 nasal adaptors to better fit all the nostrils

Omologazioni
Approvals



Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" / In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive



In conformità a: Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" ed alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Complies with: European standard EN 10993-1 "Biological Evaluation of Medical Devices" and European Directive 93/42/EEC "Medical Devices" Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006



Neutro / Neutral

Codice / Code ACO556P



8 018294 011611



Azzurro / Blue

Codice / Code ACO415P



8 018294 009304



Giallo / Yellow

Codice / Code ACO416P



8 018294 009311



Rhino Clear®
espositore da 6 pezzi
colori assortiti
Display kit including 6
pieces in assorted colours

Codice / Code ACO575P



8 018294 011789