

Rhino Clear[®] Ergo Plus

Doccia nasale per
le alte vie respiratorie
Nasal wash for the
upper airways



**Adattatore nasale
fino a 3 anni**
Nasal adapter up
to 3 years



**Adattatore nasale
da 3 a 12 anni**
Nasal adapter
from 3 to 12 years



**Adattatore nasale
dai 12 anni in su**
Nasal adapter
from 12 years old

MADE
IN ITALY

www.flaem.it

Rhino Clear® Ergo Plus

Dispositivo Medico per lavaggi e trattamenti delle cavità nasali mediante l'utilizzo di soluzioni saline e/o farmaci, la cui terapia e i farmaci devono essere prescritti dal Medico / Medical device for washing and treatments of the nasal cavities through the use of saline solutions and/or drugs, whose therapy and drugs must be prescribed by the doctor.



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Rhino Clear® nebulizza 10 ml di soluzione in circa 2 minuti / Rhino Clear® Nebulises 10 ml of solution in about 2 minutes

È dotata di una camera di nebulizzazione da riempire con max 10 ml di soluzione / Equipped with a nebulization chamber fillable with max 10 ml of solution

Nebulizza la soluzione e rimuove le secrezioni, le polveri e le sostanze nocive presenti sulle mucose epiteliali all'interno dei seni paranasali raccogliendole in un apposita camera / It nebulizes solution and removes secretions, dust and harmful substances that have accumulated inside the paranasal sinuses and collects them in a special chamber

Il corpo doccia ergonomico costituisce una comoda impugnatura fornita di pulsante per attivare la nebulizzazione senza fatica / The ergonomic nasal wash body allows a comfortable handle provided with a practical button to control the nebulization

Rhino Clear® è abbinabile a tutta la gamma di compressori pneumatici Flaem e a qualsiasi altro compressore per aerosol terapia disponibile in commercio / Rhino Clear® is compatible with the entire range of Flaem compressor nebulizer systems and any other commercially available compressor nebulizing system

È utilizzabile con soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, ai liposomi, etc.), acque termali e con farmaci, questi ultimi prescritti dal medico / It can be used with saline solutions (isotonic, hypertonic, liposome solutions, etc.), thermal waters or medications commonly available in pharmacies

I componenti di Rhino Clear® sono realizzati con materiali atossici
Rhino Clear® components are made of biocompatible, non-allergenic materials

Rhino Clear® è dotato di tre adattatori nasali per adattarsi meglio alle narici
Each Rhino Clear® comes with 3 nasal adaptors to better fit all the nostrils

Conformità
Compliance

Conforme al regolamento 2017/745 UE
"Dispositivi Medici" e successive modifiche /
In compliance with EU regulation 2017/745
Medical Device and subsequent amendments



Esente da ftalati. In conformità a Reg. (CE)
n.1907/2006 / Phthalates free. In conformity
with Reg. (EC) no.1907/2006



Rhino Clear® Ergo Plus



Codice / Code	ACO702P
Modello / Model	RC2-2



Per saperne di più
To know more

