


Il set di AirFeel® IMT include un boccaglio e una clip nasale.

Il dispositivo è realizzato con materiali di grado medico: polipropilene, silicone e acciaio inossidabile. Sono adatti alla pulizia, alla disinfezione chimica e termica, oltre ad essere autoclavabili. Una pratica clip per il naso è fornita in dotazione, utile per massimizzare gli esercizi di respirazione.

## 2 COME FUNZIONA AIRFEEL® IMT?

Quando è in posizione di riposo (1) la molla spinge il tappo della valvola evitando il passaggio dell'aria.

Quando il paziente inspira (2) la pressione applicata alla valvola (freccia blu) fa scorrere il tappo verso il basso lasciando passare l'aria (freccia azzurra). La pressione può essere impostata ruotando l'albero centrale e comprimendo/ rilasciando la molla.

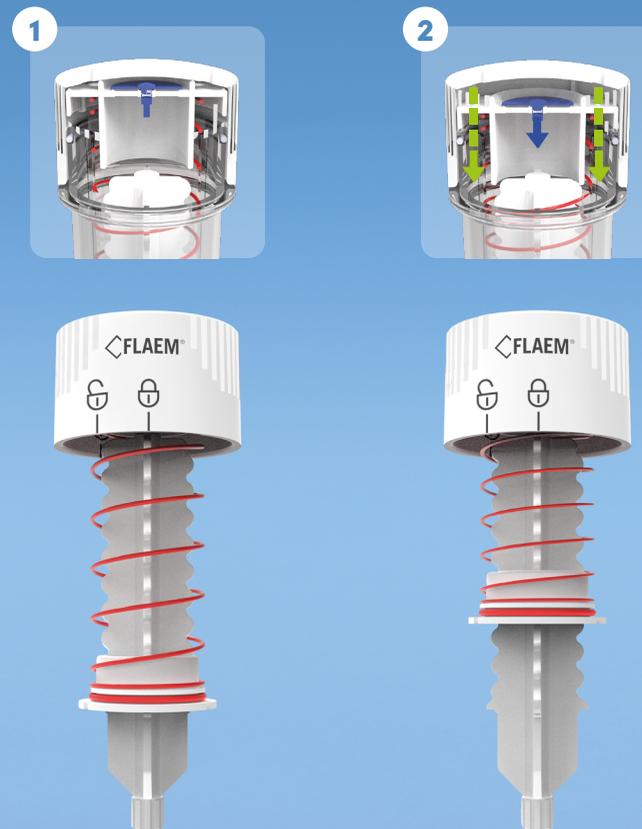

# AirFeel® IMT



**Flaem Nuova Spa**  
Via Colli Storici 221/223/225  
25015 Desenzano del Garda (BS) Italy  
Tel. (+39) 030 9910168  
info@grupproflaem.it  
www.grupproflaem.it



COD. 209990 REV. DATE 03/2025 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A.  
FLAEM NUOVA S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e funzionali a questo prodotto senza preavviso.

[www.flaem.it](http://www.flaem.it)

