

Istruzioni per l'uso
Operating instructions



TERMOFORO



TERMOFORO
HEAT PAD

IT pagina 1
GB page 6

TYPE E08Z5

GUIDA ILLUSTRATIVA - ILLUSTRATIVE GUIDE

E08Z5

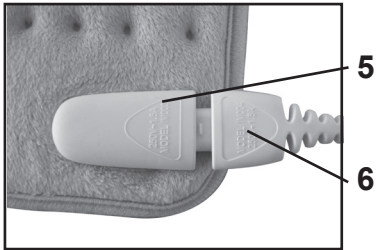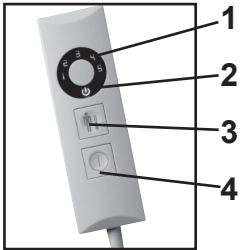

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

PANNELLO - PAD

TYPE E08Z5 220-240 V 50 Hz 25 W (max. 110 W)

FODERA - FABRIC



MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DEL TERMOFORO

Gentile cliente, La ringraziamo per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale d'istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 82079.

ISTRUZIONI IMPORTANTI CONSERVARE PER USI FUTURI.



ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita del prodotto, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.




ⓘ NOTA: se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE





AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	pag.1	PULIZIA E MANUTENZIONE	pag.4
LEGENDA SIMBOLI	pag.3	SMALTIMENTO	pag.5
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	pag.3	ASSISTENZA E GARANZIA	pag.5
USO DEL TERMOFORO	pag.3	GUIDA ILLUSTRATIVA	pag.1
UTILIZZO	pag.3	DATI TECNICI	pag.1

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA







- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.

- Il presente apparecchio deve essere destinato esclusivamente come termoforo per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire da 8 anni di età e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e di conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza, oppure se sono stati istruiti circa l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se si rendono conto dei pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.
- Questo apparecchio non deve essere usato da persone insensibili al calore, o da altre persone molto vulnerabili che sono incapaci di reagire al surriscaldamento.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età superiore ai 3 anni, se i dispositivi di comando non sono stati preregolati da un genitore o da un custode o se il bambino non è stato adeguatamente istruito su come usare in modo sicuro tali dispositivi.
-  **AVVERTENZA** – NON adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono usare l'apparecchio a causa della loro incapacità a reagire in caso di surriscaldamento.
-  **NON** azionare il comando di temperatura con mani bagnate.
-  **NON** tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio deve essere usato solo con i tipi di comando indicati sull'etichetta dell'apparecchio.
- Esaminare frequentemente l'apparecchio per accertare eventuali segni di usura o deterioramento. Se vi sono tali segni, o se l'apparecchio è stato usato male, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato prima di qualsiasi ulteriore uso.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da portatori di

pacemaker.

- Questo apparecchio non é designato per uso medico negli ospedali.
-  **NON utilizzare se bagnato.**
-  **NON usare l'apparecchio per riscaldare gli animali.**
-  **NON addormentarsi con l'apparecchio in funzione.**
-  **NON INSERIRE AGHI O SPILLI.**
- Un'applicazione prolungata con regolazione elevata può causare bruciateure alla pelle.

LEGENDA SIMBOLI

	Classe di protezione II.		Divieto.
	Avvertenza.		Selettore di temperatura.
	Selettore ON/OFF.		STAND-BY.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 Display di temperatura. | 3 Selettore di temperatura. | 5 Presa del comando. |
| 2 Display Stand-by. | 4 Selettore ON/OFF. | 6 Spina. |

USO DEL TERMOFORO

Il termoforo è progettato per riscaldare il corpo umano. Esso consente l'applicazione mirata del calore.

Il termoforo può essere posizionato su parti del corpo quali: cervicale spalle, schiena, dorsale, lombare, addominale e articolazioni a seconda del modello in suo possesso.

UTILIZZO

COLLEGAMENTO O RIMOZIONE DEL COMANDO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA





ATTENZIONE!


Il termoforo è utilizzabile esclusivamente con il comando fornito in dotazione. Il modello relativo è specificato sull'etichetta cucita sul pannello.

- Inserire la presa del comando (5) nella spina (6) per collegare il comando di regolazione della temperatura al termoforo.
- Inserire la spina elettrica nella presa di corrente.
- Posizionare il termoforo sulla parte del corpo che si intende riscaldare.

ACCENSIONE E SCELTA DELLA TEMPERATURA

- Accendere il termoforo premendo il selettore ON/OFF  (4).
- Il display (1) si illuminerà e la temperatura si imposta automaticamente sulla posizione 5.
- Premere il selettore di temperatura  (3) per selezionare la temperatura desiderata da 1 a 5, fino a quando il relativo numero si accende sul display della temperatura (1).
- Per uso continuo selezionare la temperatura da 1 (min) a 4 (max).
- Dopo circa 20' la sabbia raggiungerà un ottimale livello di calore.
- Il migliore utilizzo del calore con la sabbia si ottiene utilizzando il prodotto dal lato sabbia abbinato al lato della fodera in retina traspirante.

FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO

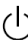- Il termoforo è dotato di un sistema di arresto automatico. Dopo 3 ore di funzionamento, il display stand-by  (2) si accende per indicare che il prodotto si è spento da solo.
- Per riaccendere l'apparecchio, premere il selettore ON/OFF (4) e selezionare nuovamente la temperatura desiderata.






SPEGNIMENTO

- Spegnere il termoforo premendo il selettore ON/OFF (4) al termine dell'utilizzo.
- Disinserire la spina elettrica dalla presa di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il termoforo è lavabile. Verificare la targhetta dei simboli di lavaggio presente sul termoforo per un corretto lavaggio.

FODERA: la fodera del termoforo è lavabile.

 Massima temperatura di lavaggio 40°C.	 Non candeggiare.
 Asciugatura a tamburo rotativo a bassa temperatura inferiore a 40°C.	 Non stirare.
 Non lavare a secco.	

PANNELLO: Il pannello contenente la sabbia non deve essere lavato

 Non lavare	 Non asciugare nell'asciugabiancheria
---	--

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELLA FODERA

Disconnettere sempre la spina elettrica e disinserire la presa del comando (5) dalla spina (6) prima di iniziare qualunque intervento di pulizia.

LAVAGGIO IN LAVATRICE

- La fodera può essere lavata in lavatrice a 40°C con programma normale.
- Usare esclusivamente il programma delicato per la centrifuga. NON effettuare un ciclo di centrifuga supplementare.

ASCIUGATURA

- Asciugare in asciugatrice con impostazione bassa.

SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

ASSISTENZA E GARANZIA

VALEVOLE 2 ANNI dalla data di acquisto **CONDIZIONI DI GARANZIA**

- L'apparecchio è garantito 2 anni dalla data d'acquisto contro qualsiasi difetto derivato dai materiali o dalla costruzione, a condizione che questi non abbia subito manomissioni da parte del cliente o da personale non autorizzato.
 - La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti.
 - Sono esclusi dalla presente garanzia, le parti soggette a naturale usura, i danni derivati da uso impropri, da cadute, dal trasporto, dalla mancata manutenzione o comunque da cause non attribuibili al costruttore.
 - Si declina ogni responsabilità per eventuali danni, diretti od indiretti, a persone e/o cose derivati dal mancato o non corretto funzionamento o dall'uso improprio dell'apparecchio.
 - La garanzia si applica su tutto il territorio italiano con l'ausilio dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati, per il resto del mondo la Garanzia viene applicata dall'Importatore o Distributore.
 - In caso di guasto, l'apparecchio adeguatamente pulito e impacchettato, deve essere inviato al Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato tramite spedizione postale, allegando il presente manuale con la garanzia debitamente compilata e lo scontrino fiscale o fattura d'acquisto (attenzione: l'importo del prodotto deve essere leggibile, non cancellato); diversamente la garanzia non sarà ritenuta valida addebitando l'importo della prestazione e del trasporto.
- Le spese postali di spedizione e riconsegna dell'apparecchio sono a carico del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato nel caso di operatività della garanzia.
- Non si risponde di ulteriori estensioni del periodo di garanzia assicurate da terzi.

ATTENZIONE: LA GARANZIA È VALIDA SOLO SE COMPILATA INTERAMENTE E MUNITA DI SCONTRINO FISCALE/FATTURA.

N° DI SERIE.....

DIFETTO RICONTRATO

.....

.....

Allegare lo scontrino fiscale o fattura d'acquisto	Rivenditore (timbro e firma)
--	------------------------------



HEAT PAD INSTRUCTIONS FOR USE

Dear customer, thanks you for purchasing this product. We are certain you will appreciate the quality and reliability of this appliance, designed and manufactured with customer satisfaction in mind. These instructions for use have been drawn up in accordance with European standard EN 82079.

IMPORTANT INSTRUCTIONS KEEP FOR FUTURE USE.



ATTENTION!

Instructions and warnings for a safe use.



Please read the operating instructions and safety warnings in particular before using the appliance and follow these at all times. Keep this manual and illustrative guide with the appliance for future consultation. Should you pass the appliance on to another user, make sure to also include this documentation.








i Should certain parts of this user manual be difficult to understand or should doubts arise, contact the company before using the product, at the address indicated on the last page.

CONTENTS







SAFETY WARNINGS	page 6	CLEANING AND MAINTENANCE	page 9
SYMBOLS	page 8	DISPOSAL	page 9
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE	page 8	ASSISTANCE AND WARRANTY	page 10
USING THE HEAT PAD	page 8	ILLUSTRATIVE GUIDE	page I
USE	page 8	TECHNICAL DATA	page I

SAFETY WARNINGS

- After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and check for any damage caused during transport. If in doubt, do not use the appliance and contact the authorised service centre.
- Do not let children play with the packaging! Keep the plastic wrapping out of the reach of children; risk of suffocation!
- Before connecting the appliance, check that the mains voltage data reported on the identification plate corresponds to that of the available electric mains. The identification plate is attached to the appliance.
- This appliance is intended exclusively as a heat pad for home

- use. Any other use is improper and potentially dangerous.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 - Do not use the appliance for ill people, for infants or for persons who are insensitive to heat.
 - This appliance must not be used by children aged from 3 years and above if the control devices have not been set beforehand by a parent or guardian or if the child has not been properly instructed on how to use the device safely.
 -  **WARNING** – NOT suitable for children under the age of 3. Children under the age of 3 must not use the appliance as they are unable to react in the event of overheating.
 -  **DO NOT** activate the temperature control with wet hands.
 -  **DO NOT** pull the power cord or the appliance itself to remove the plug from the socket.
 - Always disconnect the appliance from the mains before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
 - In case of a fault or malfunctioning of the appliance, switch it off and do not tamper with it. If the appliance needs to be repaired, contact an authorised technical service centre.
 - If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.
 - The appliance must be used solely with the types of control indicated on the label.
 - Inspect the appliance frequently to check for signs of wear and tear. If such signs are found or if the appliance has been used incorrectly, contact an authorised technical assistance centre before continuing to use it.
 - Persons with pacemakers must not use the appliance.
 - This appliance is not intended for medical use inside of hospitals.
 -  **DO NOT** use the appliance if it is wet.
 -  **DO NOT** use the appliance to keep animals warm.
 -  **DO NOT** leave the appliance running while you sleep.
 -  **DO NOT INSERT PINS OR NEEDLES.**
 - Application of the appliance for a long time at high temperature can burn the skin.

SYMBOLS

	Protection class II.		Prohibited actions.
	Warning.		Temperature selector.
	ON/OFF selector.		STAND-BY.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 Temperature display. | 3 Temperature selector. | 5 Control socket. |
| 2 Stand-by Display. | 4 ON/OFF selector. | 6 Plug. |

USING THE HEATING PAD

The heat pad is designed to warm the human body. It allows for targeted application of heat. The heat pad can be placed on parts of the body, such as: neck, shoulders, back, abdomen and joints, depending on the relative model.

USE

CONNECTING AND REMOVING THE TEMPERATURE ADJUSTMENT CONTROL





ATTENTION!


The heat pad can only be used with the control supplied. The relative model is specified on the label sewn on the panel.

- Insert the control socket (5) into the socket (6) to connect the temperature adjustment control to the heat pad.
- Insert the plug in the socket.
- Place the heat pad on the part of the body that is to be heated.

SWITCHING THE APPLIANCE ON AND SELECTING THE TEMPERATURE

- Press the ON/OFF  (4) selector to switch the heat pad on.
- The display (1) will light up and the temperature will be automatically set to position 5.
- Select the desired temperature (from 1 to 5) by pressing the temperature selector  (3) until the relative number lights up on the temperature display (1).
- Select temperature from 1 (min) to 4 (max) for continuous use.
- After about 20 'the sand will reach an optimal level of heat.
- The best use of heat with sand is obtained by using the product from the sand combined with the side of the breathable mesh lining.

AUTOMATIC SHUTDOWN

- The heat pad is provided with an automatic switch-off system. The stand-by display  (2) lights up after 3 operating hours to indicate that the product has switched off automatically.

- Switch the appliance back on by pressing the ON/OFF selector (4) and select the desired temperature once again.






SWITCH-OFF

- Switch the heat pad off by pressing the ON/OFF selector (4) when it is no longer used.
- Remove the plug from the socket.

CLEANING AND MAINTENANCE

The heat pad is washable. Refer to the washing symbols on the heat pad label for the washing instructions.

FABRIC: the fabric of the heat pad is washable.

 Wash at 40°C.	 Do not bleach.
 Tumble-dry at less than 40°C.	 Do not iron.
 Do not dry-clean.	

PAD: The pad containing the sand should not be washed.

 Do not wash.	 Do not tumble dry.
--	--

FABRIC WASHING INSTRUCTIONS

Always disconnect the plug and the control socket (5) from the socket (6) before cleaning.


 **MACHINE WASHING**


- The fabric can be machine washed at 40°C with a normal cycle.
- Only the gentle spin cycle is to be used. DO NOT set an additional spin cycle.

 **DRYING**

- Set the dryer at a low temperature.

DISPOSAL

 The product is packaged in recyclable materials. Dispose of it in compliance with the environmental protection standards.

 The product must be disposed of appropriately, in compliance with European standard 2002/96/EC. The recyclable materials contained in the appliance must be recovered so as to prevent environmental pollution. For further information, contact the local disposal body or the appliance dealer.

FLAEMNUOVA[®] S.p.A.

SERVICE

Centri Assistenza Autorizzati per l'Italia



ELETTROMEDICALI

01/09/2014

• This list is valid for Italy only. For servicing outside of Italy please refer to your local dealer. • Cette liste de service après-vente n'est valable que pour l'Italie. A l'étranger, contacter le revendeur le plus proche. • Diese Liste ist nur für Italien gültig. Für Kundenservices ausserhalb Italien wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Händler. • Esa lista es válida únicamente en Italia. Para el servicio de asistencia fuera de Italia, contactar con el revendedor local. • Esta lista só é válida para a Itália. Para a assistência fora de Itália, por favor contactar o revendedor local.

PIEMONTE

ALESSANDRIA
TECNO SERVICE di F. Casagrande & C
Via Milano, 113 - 15100 ALESSANDRIA
Tel 0131/222440 Fax 0131/225611
e-mail: info@tecnoservice-al.it

BIELLA
ANGELONE MARIA
Via Valle D'Aosta, 2 - 13900 BIELLA
Tel 015/352880 Fax 015/2523407
e-mail: ilang@tin.it

CUNEO
CAPER di Ferrero e Tassone s.n.c.
Via Piave, 1 - 12100 CUNEO
Tel./Fax 0171/65481
e-mail: caper@gem.it

CUNEO - MOROZZO
L'OASI SNC di Comino A&G
Via Mondovì, 61 - 12040 MOROZZO (CN)
Tel. 0171/772550 Fax 0171/772554
e-mail: loasicomino@alice.it

NOVARA - ROMENTINO
GAZZONI MAURIZIO
Via per Galliate, 36 - 28068 ROMENTINO (NO)
Tel 0321/861634 Fax 0321/865856
e-mail: maurizio_gazzoni@fastwebnet.it

TORINO
CORIMED di Passeri Mario
C.so Caio Plinio, 54 - 10127 TORINO
Tel. 011/351139 Fax. 011/3167998
e-mail: corimed.torino@libero.it

TORINO
ZABARDI SERVICE SNC
Via Sagra di San Michele, 21/A
10139 TORINO
Tel. 011/4345703 Fax. 011/4334794
e-mail: Zabard00@zabardiservice.191.it

VERCELLI
R.E.A. di Bortolan Emanuele
C.so M. Prestinari, 123 - 13100 VERCELLI
Tel. 0161/250566 Fax 0161/214877
e-mail info@reaonline.com

VAL D'AOSTA

AOSTA
ELETTORIPARAZIONI DI IENARO & C.
Via Monte Vodice, 36 - 11100 AOSTA
Tel 0165/230260 Fax 0165/232000
e-mail: elettroiparazioni.ienaro@gmail.com

LIGURIA

GENOVA
RAM di Zanetti & C.
Via Casaregis, 22-24/R - 16129 GENOVA (FOCE)
Tel. 010/5761476 - Fax. 010/580683
e-mail: ram@elettromedicali.it

GENOVA
PUNTO SERVICE SAS di Primerano Maurizio
Via Pacinotti, 28/R - 16151 GENOVA
Tel 010/8601585 - Cell 347/3747680
e-mail: puntoservice@gmail.com

LOMBARDIA

BERGAMO
AUDIOVIDEOCENTER di Cattaneo F.
Via Spino, 102 - 24126 BERGAMO
Tel./Fax 035/315998 - Fax 035/313687
e-mail: avc.bg@garanzia.pro

BERGAMO
CASA DEI RASOI ELETTRICI
Via G. Carducci, 7 - 24127 BERGAMO
Tel./Fax 035/258885 - Fax 035/264070
e-mail: cn.klenz@tin.it

BRESCIA
ZAMBONI SERVIZI di Raffaele Festari
Via Bezzeca, 29 - 25128 BRESCIA
Tel e Fax 030/392091
e-mail: assistenza@zamboniservizi.it

BRESCIA - RIVOLTELLA D/GARDA
ALBACHIARA di Tonioli Davide
Via G. di Vittorio, 153
25015 R IVOLTELLA DI DESENZANO (BS)
Tel. e Fax 030/9119912
e-mail: albachiaara-snc@libero.it

CREMONA
SANDRI CHIARA ROSALIA
Via Porta Marzia, 6 - 26100 CREMONA
Tel e Fax 0372/21793
Cell.320/9328755
e-mail: gi.gamba@fastpui.it

CREMONA - CREMA
R.I.E. di Cassani Davide Franco e c. snc
Via Desti, 9 - 26013 CREMA (CR)
Tel 0373/84685 Fax 0373/257917
e-mail: info@riecrema.com

LECCO
G.S.T. di Teriaca Giuseppe & C. snc
Via Flli Bandiera, 4/A - 22053 LECCO
Tel e Fax 0341/493614
e-mail: gst.lecco@fastwebnet.it

MANTOVA
FERRI SERGIO di Ferri Sergio & C.
Via Osavia, 4/A - 46100 MANTOVA
Tel 0376/320798 Fax 0376/289684
e-mail: ferrisnc@tin.it

MILANO
CONSONNI PASQUALE
Via Mosca, 12 - 20152 MILANO
Tel 02/4563169 Fax 02/4598906
e-mail: conson1d@pasqualeconsonni.191.it

MILANO
GAMMA SERVICE SNC
Via Agostino De Pretis, 44 - 20142 MILANO
Tel 02/84800827 Fax 02/84810962
e-mail: gammaservicesnc@gmail.com

MILANO
IREP SERVICE di Giovanni Annicchiarico
Via L. Biraghi, 13 - 20159 MILANO
Tel 02/6884039 Fax 02/6884918
e-mail: irepservice@libero.it

MILANO
MICROCENTRO di M. & M. Di Bari
Via Falloppio, 11 - 20131 MILANO
Tel 02/26827306 Fax 02/2826711
e-mail: commerciale@microcentro.it

MILANO
PC ONLINE
Piazza Napoli 22 - 20146 MILANO
Tel 02/36551923
e-mail: info@pconline.it

MILANO - BARANZATE DI BOLLATE
SALUS MEDICAZIONI
Via Aquileia, 35 - 20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI)
Tel 02/3560498 Fax 02/3562892
e-mail: info@salusmedicazioni.it

MILANO - CARUGATE
EURORIPARAZIONI
di Passoni Claudio e Cogliati Daniele & C.
Via Cesare Battisti, 76 - 20061 CARUGATE (MI)
Tel./Fax 02/92150533
e-mail: info@euroriparazioni.eu

MILANO - GORGONZOLA
M.A.R. di Maruca Alberto
Via IV Novembre, 14 - 20064 GORGONZOLA (MI)
Tel e Fax 02/95301769
e-mail: alberto.maruca@gmail.com

MILANO - NOVA MILANESE
RAMPAZZO MATTEO ANGELO
Via Poldelmengo, 6 - 20054 NOVA MILANESE (MI)
Tel. 0362/450505
e-mail: rampazzo.william@tiscali.it

MILANO - SEREGNO
FERRARIO sas
Via Macallè, 5 - 20038 SEREGNO (MI)
Tel./Fax 0362/224180
e-mail: f.ferrariosas@tin.it

SONDRIO - MORBEGNO
A.R.E.S. di Simonelli Giuseppe & C.
Via Stelvio, 114/D - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel e Fax 0342/611047
e-mail: ares@webares.it

VARESE - GALLARATE
EMME DI ERRE di Radivo Andrea
Via Ambrosoli, 13 - 21013 GALLARATE (VA)
Tel 0331/791932 Fax 0331/246483
e-mail: info@emmedierre.it

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO
TECNOASSISTENZA SAS
Via Max Planck, 31 - 39100 BOLZANO
Tel 0471/200099 - Fax 0471/919661
e-mail: tecnoassistenzasnc@virgilio.it

TRENTO
SERVIMED SRL
Via De Gasperi, 27 - 38100 TRENTO
Tel 0461/331208 Fax 0461/1860186
e-mail: info@servimed.it

VENETO

PADOVA
ELETTROMEDICAL di Grohovaz Lorenzo
Via Buonarroti, 29 - 35135 PADOVA
Tel 049/600075 - Fax 049/8647617
e-mail: info@elettromedical.net

ROVIGO
REMA di Flavio Martello
Viale Tre Martiri, 71/E - 45100 ROVIGO
Tel e Fax 0425/21049
e-mail: martello2@remaricambi.191.it

TREVISO
VRET di Povegliano E. & C. SNC
Via della Repubblica, 222/A - 31100 TREVISO
Tel 0422/422777 - Fax 0422/422772
e-mail: vret@libero.it

VENEZIA - SCORZE'
DALLE GRAVE WALTER
Via Lombardia, 1 - 30037 SCORZE' (VE)
Cell. 338 2926877
e-mail: walterdallegrave@libero.it

VENEZIA - SUMMAGA DI PORTOGUARO
BATTAGLINI FILIPPO
Via Montecassino, 38/40
30020 SUMMAGA DI PORTOGUARO (VE)
Tel e Fax 0421/205261
e-mail: filippo.battaglini@tele2.it

VERONA
CORATO GIOVANNI
Corso Porta Nuova, 131/A - 37122 VERONA
Tel 045/8007384 Fax 045/8006737
e-mail: corato@supernet.it

VICENZA
MAGNABOSCO GIORGIO & C.
Via Stradella dei Cappuccini, 9 - 36100 VICENZA
Tel 0444/323675 Fax 0444/230791
e-mail: magnabosco.g@tin.it

VICENZA - BASSANO DEL GRAPPA
C.A.T. snc di Zanivan Giovanni & C.
Via P. Giraldi, 9/A
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel e Fax 0424/504295
e-mail: catanto@libero.it

FRIULI

UDINE - PASIAN DI PRATO
CENTRI ASSISTENZA RIUNITI S.a.s.
di Codarini Denis & C.
Via Campoformido, 127/16
33037 PASIAN DI PRATO (UD)
Tel. 0432/699215 Fax 0432/699185
e-mail: info@centriassistenziariuniti.com

GORIZIA-MONFALCONE
VISAGGIO GIORDANO
Via Romana, 185 - 34074 MONFALCONE (GO)
Tel. 0481/413134 Fax 0481/419341
e-mail: visaggiogiordano@gmail.com

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
ZOOM SERVICE di Meletti Amedeo
Via San Pio V, 12/A - 40131 BOLOGNA
Tel 051/558679 Fax 051/525357
e-mail: archimedeo@zoomservice.net

FERRARA
C.A.P.E. SNC
Via Compagnoni, 109 - 44100 FERRARA
Tel. e Fax 0532/903693
e-mail: cape-fe@libero.it

FERRARA
ORTOPEDIA SANITARIA S. ANNA
C.so della Giovecca, 164/166
44100 FERRARA
Tel. 0532/202636 - Fax 0532/249655

FORLÌ
CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI
di Lippi Tonino & C. snc
Via S.Corbari, 5 - 47100 FORLÌ
Tel e Fax 0543/33078
e-mail: toninolippi@libero.it

MODENA
CENTRO SANITARIA ORTOPEDIA ESTENSE srl
Via S. Eufemia, 57 - 41100 MODENA
Tel e Fax 059/223710

PARMA
MEDFAR srl
Via Ximenes, 10/A - 43100 PARMA
Tel e Fax 0521/486330
e-mail: info@medfar.it

PIACENZA
CCR MEDICAL
Via Orsi, 11 - 29100 PIACENZA
Tel 0523/579000 Fax 0523/617091
e-mail: info@ccrmedical.com

PIACENZA
CRAVEDI MAURIZIO
Via Faustini, 2/A - 29100 PIACENZA
Tel e fax 0523/498935
e-mail: cat.cravedi@libero.it

RAVENNA
ER. CA. srl
Via Antonelli, 13/17 - 48100 RAVENNA
Tel. e Fax 0544 / 500937
e-mail: ercasrl@ercaravenna.191.it

RAVENNA - FAENZA
C.A.R.P.E.F. di CECCARINI LORENZO
C.so Mazzini, 131 - 48018 FAENZA (RA)
Tel. e Fax. 0546/661622
e-mail: lollo_83@alice.it

RIMINI
SIRIO srl
Via Paulucci, 14/B - 16 - 16/A - 47900 RIMINI
Tel 0541/385761 Fax 0541/384380
e-mail: info@siriosrl.com

UMBRIA

PERUGIA
CAMILLONI MAURIZIO snc
Via Romeo Gallenga, 84 - 06100 PERUGIA
Tel e Fax 075/5054365
e-mail: camilloni.snc@gmail.com

PERUGIA
KIMAL s.r.l.
Via V. E. Orlando, 10 - 06128 PERUGIA
Tel 075/5055143-4 Fax 075/5005014
e-mail: kimal srl@libero.it

TERNI - ORVIETO
UBALDINI SPARTACO
Piazza S. Giovenate, 1 - 05018 ORVIETO (TR)
Tel 0763/341303 Fax 0763/340991
e-mail: ubaldini@orvietnet.it

TERNI
SANTILLI ANGELO
Via Aleardi, 8 - 05100 TERNI
Tel 0744/401889 Fax 0744/58863
e-mail: santilli.angelo@libero.it

TOSCANA

FIRENZE
SIGNALTRON di Andrea Profeti
Via Frà Paolo Sarpi, 38 - 50136 FIRENZE
Tel 055/661217 Fax 055/669906
e-mail: senzabarriere@combisignaltron.it

FIRENZE
A.T.F. SRL
Via Reginaldo Giuliani, 134/R - 50141 FIRENZE
Tel e Fax 055/4564174
e-mail: famiglia@toscoservice.it

FIRENZE - ZONA OVEST
A.T.F. SRL
Via della Villa Demidoff 36/42 - 50127 FIRENZE
Tel. 055/359908
e-mail: baracca@atfsrl.it

FIRENZE - ZONA SUD
A.T.F. SRL
Viale Giannotti, 72/rosso - 50126 FIRENZE
Tel. 055/689205
e-mail: giannotti@atfsrl.it

FIRENZE - SCANDICCI
A.T.F. SRL
Piazza Togliatti, 42 - 50018 SCANDICCI (FI)
Tel. 055/2590168
e-mail: scandicci@atfsrl.it

GROSSETO
TONINI SERVICE SAS di Marco Esposito & C.
Via Ametista, 22 - 58100 GROSSETO
Tel e Fax 0564/492977
e-mail: info@toninisevice.it

LIVORNO
CENTRO FORNITURE SANITARIE SNC
Via Azzati, 36 - 57121 LIVORNO
Tel 0586/444369 Fax 0586/443608
e-mail: info@cfs.it

PISA - FORNACETTE D/CALCINAIA
MEDISER srl
Via Enrico Fermi, 34/A
56012 FORNACETTE DI CALCINAIA (PI)
Tel 0587/421756 Fax 0587/422239
e-mail: mediser@mediser.eu

PISTOIA
C.A.R.E. SRL
Via Carratica, 23 - 51100 PISTOIA
Tel.0573/25313 Fax 0573/506289
e-mail: care.car@tin.it

PISTOIA - MONTECATINI TERME
MAZZAFERRO ARCANGELO
Corso Giovanni Amendola, 20 - PISTOIA (PT)
Via Prov.le Lucchese, 10/A - B
51016 MONTECATINI TERME (PT)
Tel 0572/771680 Fax 0572/901548
e-mail: mazzaferroarc@hotmail.com

PRATO
RETEMA di Appetecchi Maurizio
Via Pistoiese, 229 - 59100 PRATO
Tel e Fax 0574/32348
e-mail: annalisa@retema.net

SIENA - POGGIBONSI
ANTARES di Guercini David
Via S. Gimignano 90 a/Bis - 53036 POGGIBONSI (SI)
Tel e Fax 0577/982325
e-mail: antares.riparazioni@hotmail.it

MARCHE

ANCONA - FABRIANO
C.R.E. di Giacometti Giorgio
Via Martiri della Libertà, 46/Z
60044 FABRIANO (AN)
Tel e Fax 0732/24184
e-mail: giacog@libero.it

ASCOLI PICENO
DI SIMONE SAVERIO
Via M. Federici, 20 - 63100 ASCOLI PICENO
Tel e Fax 0736/47970 - Cell. 335/6234432
e-mail: saveriodisimone@libero.it

ASCOLI PICENO - ACQUAIVA PICENA
A.R. ASSISTENZA RICAMBI di Angellotti Rocco
Via S. Francesco, 29 - 63030 - ACQUAIVA PICENA
Tel e Fax 0735/780959 - Cell. 348/6006001
e-mail: angellottirocco@tin.it

ASCOLI PICENO - GROTTAMMARE
CORSINI ALESSANDRO
per VIVISOL CENTRO ADRIATICA
Via Leonardo Da Vinci, 38/40
63013 GROTTAMMARE (AP)
Tel 0735/632119 Fax 0735/731021
e-mail: corsini.gasmedicali@libero.it

MACERATA
G.R.E. srl
Via dei Velini, 91/E - 62100 MACERATA
Tel 0733/264960 Fax 0733/267315
e-mail: gremc@gremc.it

ABRUZZO

CHIETI - CUPELLO
TADDEO ROBERTO SERVIZIO ASSIST. TECNICA
Via dell'Artigianato, 11 - 66051 CUPELLO (CH)
Tel. e Fax. 0873/318195
e-mail: r_taddeo@tiscali.it

CHIETI SCALO
SERRA SERVICE SRL
Via Erasmo Piaggio c/o Parco Paglia
66100 CHIETI SCALO (CH)
Tel e Fax 0871/552291
e-mail: giuseppe.serra_gs@libero.it

L'AQUILA
C.T.R. di De Berardinis Alessandro
Via G. Cacchi, 18 - 67100 L'AQUILA
Tel 0862/315407
e-mail: adeberardinis@virgilio.it

L'AQUILA
EUREKA
S.S. 17, 30 - 67100 L'AQUILA
Tel 0862/312961
e-mail: eurekaaqtiscali.it

L'AQUILA - AVEZZANO
D.B. RICAMBI E SERVICE di De Berardinis Fabrizio
Via P. Gobetti, 10 - 67051 AVEZZANO (AQ)
Tel e Fax 0863/412131
e-mail: debeberardinisfabrizio@libero.it

TERAMO - VILLA ROSA DI MARTINSICURO
CENTRO TECNICO VIBRATA SNC
S.S. 16 Adriatica, 135
64010 VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE)
Tel 0861/753225 - Fax 0861/716154
e-mail: info@centrotecnicovibrata.com

MOLISE

ISERNIA
SCARSELLI ELIO Ass. e Rip. Elettrodomestici
Corso Risorgimento, 306-306/A - 86170 ISERNIA
Tel e Fax 0865/414496
e-mail: elscars@tin.it

LAZIO

FROSINONE
TELECAB ELETTRONICA
S.S. 155 direz. Fiuggi, 102 - 03100 FROSINONE
Tel. 0775/270981 - Fax 0775/820303
e-mail: info@bellicat.it

FROSINONE - CASSINO
BELLI C.A.T. snc di Belli Francesco e Vincenzo
Piazza Restagno, 23/25 - 03043 CASSINO (FR)
Tel e Fax 0776/21177
e-mail: info@bellicat.it

LATINA-FORMIA
GRUPPO ALCI SRL
Via Giacomo Matteotti, 12/14
04023 FORMIA (LT)
Tel. 0771/23916
e-mail: gruppoalci@gmail.com

RIETI
CASA OK di Fazi Marco
Via Cicchetti, 10/12 - 02100 RIETI
Tel. 0746/259933
e-mail: casa.ok@alice.it

RIETI
EUREKA
Piazza Matteocci, 15 - 02100 RIETI
Tel e Fax 0746/296555
e-mail: eurekaaqtiscali.it

RIETI
PEZZOTTI SOC. COOP.
Piazza Marconi, 13 - 02100 RIETI
Tel 0746/482623 Fax 0746/293157
e-mail: pezzotti.fabr@tin.it

ROMA
DITTA GIUSEPPE FERRI
Via Gregorio VII, 274/C - 00165 ROMA
Tel 06/39377997 - Fax 06/39377997
Via Germanico, 35
Tel 06/39723043 - Fax 06/39723043
e-mail: info@ferrigiuseppe.com

ROMA
GIMAR di Gianfranco Marinelli
Via dei Frassini, 124/126 - 00172 ROMA
Tel.06/23232321 Fax 06/2312959
e-mail: gimargia@libero.it

ROMA
GRAM ELETTRONICA SAS di Osimani Luigi
Via Vacuna, 79 - 00157 ROMA
Tel. e Fax 06/4506148
e-mail: gram.elettronica@tiscali.it

ROMA
ITALMERCURY srl
Via Nizza, 31 - 00198 ROMA
Tel. 06/85354038 - Tel. e Fax 06/8548576
e-mail: italm Mercury@tiscali.it

ROMA
ITALO GALLO
Via Voghera, 52 - 00182 ROMA
Tel. 06/7012513-611 - Tel. e Fax 06/7012810
e-mail: info@italogallo.it

ROMA
VINCAL sas
Circ. Casilina, 131/135 - 00176 ROMA
Tel 06/21710095 Fax 06/21702993
e-mail: info@vincal.it

ROMA - GUIDONIA
CATALDO PASQUALE GAETANO
Via Roma 235/A - 00012 GUIDONIA (ROMA)
Tel. 0774/345144
e-mail: cataldo.negozi@ricambicataldo.net

ROMA - OSTIA
DIERRE LIDO srl
Via G. da Sangallo, 44 - 00119 OSTIA (ROMA)
Tel 06/5672806 Fax 06/5672421
e-mail: lido@dierre-srl.it

ROMA - TIVOLI
OSIMANI CLAUDIO
Via dei Sosii, 64/66 - 00019 TIVOLI (ROMA)
Tel 0774/312663 Fax 0774/313210
e-mail: claudio@osimani.it

VITERBO
MARTINI SERVICE SNC
Via A. Gargana, 29 - 01100 VITERBO (VT)
Tel 0761/305827 Fax 0761/305203
e-mail: martiniservice@gmail.com

VITERBO
SCAGNOLI di Bruzzi Giuseppe
Via Belluno, 53 - 01100 VITERBO
Tel 0761/228075 Fax 0761/328084
e-mail: scagnoliriparazioni@gmail.com

CAMPANIA

BENEVENTO
D&G SERVICE SAS-RIPAR.ELETTROD
Via Torre della Catena, 107 - 82100 BENEVENTO
Tel e Fax 0824/42214
e-mail: catpalumbo@interfree.it

BENEVENTO
TELEART di Gioia Girolamo
Viale P. di Napoli, 161 - 82100 BENEVENTO
Tel e Fax 0824/28896
e-mail: artele@libero.it

CASERTA
LAREL S.r.l.
Via Roma, 161 - 81100 CASERTA
Tel 0823/329014 Fax 0823/448896
e-mail: larelc@inwind.it

NAPOLI
S.A.R.I.E.L. s.a.s
Via Diocleziano, 177 - 80138 NAPOLI
Tel 081/7628155 - Fax 081/7628155
e-mail: sariel@sarielsas.it

altro laboratorio di S.a.r.i.e.l.
si trova al seguente indirizzo:
- Napoli - Via Maria Longo, 14
Tel 081/0332182

NAPOLI - CASORIA
SAT DI CHIACCHIARINI UGO
Via Naz. delle Puglie, 176 - 80026 CASORIA (NA)
Tel e Fax 081/7595638
e-mail: lasatcasorianapoli@libero.it

NAPOLI - CASTELLAMARE DI STABIA
ELETRONICA STABIESE
di De Martino U. & Olivo M.
Via Virgilio, 45 - 80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)
Tel 081/8703433 Fax 081/8728305
e-mail: elettronica_stabiese@inwind.it

NAPOLI - SAN GIUSEPPE VESUVIANO
ELETTRODOMESTICI SAGGESE Agostino Franco
Via Passanti, 249
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Tel e Fax 081/5292518
e-mail: elettrodomesticisaggese@virgilio.it

SALERNO
BALDI & CONTE S.A.S. DI CONTE MARIA E C.
Via Matteo Rossi, 15 - 84127 SALERNO
Tel 089/2961013 - Fax 089/795517
e-mail: baldi-conte@libero.it

SALERNO - BATTIPAGLIA
DI. SAL. di Di Lascio Alfredo
Via Belvedere, 158 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)
Tel e Fax 0828/671600
e-mail: dilascio1@disaldidilascioalfredo.191.it

SALERNO - CAPACCIO SCALO
S.A.T. di Capo Carmine
Via Sandro Pertini, 20 - 84040 CAPACCIO SCALO (SA)
Tel e Fax 0828/723855
e-mail: sat.77@libero.it

SALERNO - NOCERA INFERIORE
ORTOPEDIA NOVASANITAS
di C. F. Palesandolo
Via A. Barbarulo, 40 - 84014 NOCERA INFERIORE (SA)
Tel 081/926779 Fax 081/920863
e-mail: ortopedianovasanitas@libero.it

SALERNO - OLEVANO SUL TUSCIANO
DIGITAL ELETRONIC di Granese Lucio
Via Mensa, 161
84062 OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)
Tel 0828/621435 Fax 0828/621700
e-mail: digital.eletronic@tin.it

SALERNO - VALLO DELLA LUCANIA
DI. SAL. di Di Lascio Alfredo
Via Cammarota, 89 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
Tel. 0974/72177
e-mail: disalvallo@di-sal.191.it

BASILICATA

MATERA
ELETRONICA 4 EMME di V. Montemurro & C.
Via Settembre, 12/14 - 75100 MATERA
Tel e Fax 0835/333421
e-mail: pasmon@tiscalinet.it

POTENZA
LA SAPONARA NICOLA
Via del Gallitello, 60 - 85100 POTENZA
Tel e Fax 0971/54423
e-mail: lasaponara-nicola@libero.it

PUGLIA

BRINDISI
RENNA MICHELE
Via Pola, 7 angolo Via Montenero, 16
72100 BRINDISI
Tel e Fax 0831/523858
e-mail: dittamichele.renna@hotmail.it

FOGGIA - BICCARI
DITTA RUSSO DONATO ELETTRODOMESTICI
Via F.P. Annunziata, 103 - 71032 BICCARI (FG)
Tel e Fax 0881/591214
e-mail: russoelettrodomestici@hotmail.it

FOGGIA - ORTA NOVA
ELETTROPIU' di Russo Natale
Corso Vito Vittorio Le Noci, 30/32
71045 ORTA NOVA (FG)
Tel 0885/784496 Fax 178/6089298
e-mail: info@elettropiurusso.it
www.elettropiurusso.it

LECCE
MEDIC'S BIOMEDICA SRL
Via D. Birago, 66 - 73100 LECCE
Tel 0832/351585 Fax 0832/351346
e-mail: info@medics.it

CALABRIA

CATANZARO - CATANZARO LIDO
MEDAGLIA MAURO
Via Torrazzo 60/62
88100 CATANZARO LIDO (CZ)
Tel. 0961/31626
e-mail: gmedaglia@tiscali.it

COSENZA
CARBONE FRANCESCO
Via Montevideo, 33/D-E - 87100 COSENZA
Tel 0984/395254 Fax 0984/395254
e-mail: carblab1@tiscali.it

COSENZA - CARIATI MARINA / CROTONE
F.A.G. SERVICE SRL
Via Magenta, 7 - 87063 CARIATI MARINA (CS)
Tel e Fax 0983/91943
Sede principale: Via Torino, 127 - CROTONE
Tel e Fax 0962/905535
e-mail: carciati@fagservicesrl.com

COSENZA - CORIGLIANO CALABRO
VIEMME SERVICE di M.Visciglia
Via E. Salgari SNC
87064 CORIGLIANO CALABRO (CS)
Tel. 0983/888310 - Fax 0983/1980104
e-mail: viemme-service@libero.it

COSENZA - SAN MARCO ARGENTANO
BERARDI FRANCESCO
Via A. De Gasperi, 40
87018 S. M. ARCO ARGENTANO (CS)
Tel e Fax 0984/518187
e-mail: berardi@berardi.it

REGGIO CALABRIA
SALUS & LUDUS di Sorrenti Angelo
Via Modena Ina Casa, 5/7
89123 REGGIO CALABRIA
Tel e Fax 0964/594722
e-mail: andrales@interfree.it

REGGIO CALABRIA - BOVALINO M.NA
**CHIARANTANO SEBASTIANO
FERDINANDO**
V.le Magna Grecia, snc - 89034 B OVALINO M.NA (RC)
Tel. e Fax 0964/66925
e-mail: chiarantano.asstec@libero.it

REGGIO CALABRIA - LOCRI
VERIMAC 2 di Dimasi Emanuele
Via Foggia snc - 89044 LOCRI (RC)
Tel e Fax 0964/22049
e-mail: emanueledimasi@virgilio.it

SICILIA

AGRIGENTO - FAVARA
A.T.D. di Mallia G. in Fanara
Via Ciacio Montalto, 19 - 92026 FAVARA (AG)
Tel 0922/436785 Fax 0922/436969
e-mail: agfanara@libero.it

CALTANISSETTA - NISCEMI
TINNIRELLO GIANMARCO
Via De Nicola, 50 - 93015 - NISCEMI (CL)
Tel. Fax 0933/951441
e-mail: tinnirello.elettrodomestici@gmail.com

CATANIA
ELETTRICITA' di Simone Giuseppe
Via Etnea, 449 - 95125 CATANIA
Tel e Fax 095/446841
e-mail: simoneservice@libero.it

CATANIA
FARMAC D. BONFANTI SRL
Via M. Cilestri, 38 - Ang. Via Pola, 1 - 95127 CATANIA
Tel.095/381448 Fax 095/386969
e-mail: farmac.bonfanti@gmail.com

ENNA
TECNOCASA di Eredi Tirrito Gaetano Giovanni
Via Basilicata, 17 - 94100 ENNA
Tel. e Fax 0935/533674 - Cell. 393/9004982
e-mail: tecnocasa60@hotmail.com

ENNA - PIAZZA ARMERINA
TECNOCASA di Tirrito Gaetano Giovanni
Viale della Libertà, 66
94015 PIAZZA ARMERINA (EN)
Tel e Fax 0935/89098
e-mail: tecnocasa60@hotmail.com

MESSINA - OLIVARELLA/MILAZZO
MANCUSO ANTONIO
Via della Concordia, 53 - 98040 OLIVARELLA (ME)
Tel e Fax 090/931343
e-mail assistenzamancuso@virgilio.it

altri laboratori di Mancuso si trovano
ai seguenti indirizzi:
- Milazzo - Via Cavour, 15
- Barcellona - Via Operai, 47
- Scala Torregrotta - Via Nazionale, 148
- S. Agata di Militello - Via San Giuseppe, 62

PALERMO
GIAMMARRESI GIUSEPPE
Via Marchesi, 3 - 90100 PALERMO
Tel. 091/6258924 Fax 091/6257684
e-mail: giammarresigiuseppe@libero.it

SIRACUSA
TECNOSERVICE di Formica Salvatore
Via Grottasanta, 241 - 96100 Siracusa
Tel. 0931/412656
e-mail: tecnoservice94@gmail.com

TRAPANI
**AGLIASTRO SANITARIA ORTOPEDIA
TECNICA**
Via Virgilio, 111/113 - 91100 TRAPANI
Tel e Fax 0923/24001
e-mail: robaglia@tin.it

TRAPANI - PETROSINO
DELFINO GIUSEPPE
Via T. Tasso, 50/B - 91020 PETROSINO (TP)
Cell.3393391377 Fax 0923/732138
e-mail: delfino-giuseppe@virgilio.it

SARDEGNA

CAGLIARI - SELARGIUS
MEDICALI BARBIERI di Barbieri Nicola
Piazzale A. Ricchi 12
(parcheeggio Ospedale Brotzu)
Tel 070/5435027 Fax 070/5435037
e-mail: barbuierinicola@tiscali.it

NUORO
AUDIOEFFE di Franceschelli Fabrizio
Via Mannironi, 30 - 08100 NUORO
Tel e Fax 0784/235041
e-mail: audioeffe@tiscali.it

OLBIA
SPANO ELETTRODOMESTICI
di Spano Riccardo
Via Tre Venezie, 55/59 - 07026 OLBIA (OT)
Tel e Fax 0789/21679
e-mail: spano.sat@tiscali.it

ORISTANO
CELLULAR HOSPITAL S.A.S.
Via Umbria, 111 - 09170 ORISTANO
Tel e Fax 0783/023780
Cell. 338 8150330
e-mail: cellularhospital1@yahoo.it

SASSARI
NUOVA ELETTRONICA
di A. Coradduzza e G. Muredda
Via Coradduzza, 13/15 - 07100 SASSARI
Tel e Fax 079/277615
e-mail: nuovaelettronica@tiscali.it

MI001766
1114